



Gebrauchs-Anweisung Infyna Chic™ Einmal-Katheter für die Frau



Diese Schritt-für-Schritt-Anleitung in Leichter Sprache wurde durch Menschen mit Lern-Schwierigkeiten von dem Büro Einfach verstehen – Medienwerkstatt für Leichte Sprache, Mitglied im Netzwerk Leichte Sprache, geprüft.

Infyna Chic™

Intermittierende Einmalkatheter



- 7.** Spreizen Sie die Schamlippen mit 2 Fingern Ihrer Hand. Bei Rechts-Händlern ist es die linke Hand. Bei Links-Händlern ist es die rechte Hand. Mit der anderen Hand führen Sie den Katheter in die Harnröhren-Öffnung ein.
- Bis der Urin zu fließen beginnt.
 - Fassen Sie nur den Trichter an!

- 8.** Ziehen Sie den Katheter **langsam** zurück, wenn kein Urin mehr fließt. Wenn wieder Urin fließt, warten Sie. Bis kein Urin mehr fließt. Wenn Sie sicher sind, dass Ihre Blase völlig leer ist: Nehmen Sie den Katheter **vorsichtig** heraus.
- Sie können den benutzten Katheter wieder in die Verpackung tun.
 - Schließen Sie den Deckel.



Entsorgen

- 9.** Werfen Sie den Katheter und die Verpackung in den Abfall-Eimer.
- Nicht in die Toilette.
 - Der Katheter kommt in den Rest-Müll. Die Verpackung kann zum Plastik-Müll.

- 10.** Waschen Sie Ihre Hände.
- So wie die medizinische Fachkraft es erklärt hat.

Indikationen und bestimmungsgemäßer Verwendungszweck: Dieser Einmalkatheter zur intermittierenden Katheterisierung ist ein biegsames röhrenförmiges Hilfsmittel, das bei erwachsenen und pädiatrischen Patientinnen, bei denen Urin aus der Blase abgeleitet werden muss, durch die Harnröhre eingeführt wird.

Warnhinweise: Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Verpackung beschädigt ist oder geöffnet wurde. Zur Verringerung des Infektionsrisikos und/oder anderer Komplikationen nicht wiederverwenden. Sollten Beschwerden oder Zeichen eines Traumas der Harnröhre auftreten, brechen Sie den Gebrauch bitte umgehend ab und suchen Sie Ihre medizinische Fachkraft auf.

Vorsichtsmaßnahmen: Wenn eine der folgenden Indikationen vorliegt, suchen Sie bitte vor Gebrauch dieses Produktes Ihre medizinische Fachkraft auf:

- Harnröhrenriss
- Ungeklärte Blutung aus der Harnröhre
- Ausgeprägte Harnröhrenstriktur
- Via falsa – Perforation der Harnröhrenwand durch Katheterismus
- Urethritis – Entzündung der Harnröhre

Selbstkatheterismus sollte dem Behandlungsplan und der Empfehlung Ihrer medizinischen Fachkraft folgen und in Übereinstimmung mit der zur Verfügung gestellten Gebrauchsanleitung durchgeführt werden. Da die Häufigkeit der Katheterisierung bei jeder Person anders ist, sollte Ihre medizinische Fachkraft eine Empfehlung über die Häufigkeit Ihrer Katheterisierung abgeben. Zu anderen Fragen über Ihre Katheterisierung kontaktieren Sie bitte Ihre medizinische Fachkraft.

Lesen Sie vor der Verwendung die Gebrauchsanleitung mit Informationen zu Verwendungszweck, Kontraindikationen, Warnhinweisen, Vorsichtsmaßnahmen und Anleitungen.

**Hollister Incorporated
Niederlassung Deutschland**

Riesstraße 25
D-80992 München
www.hollister.de

Sie erreichen uns

Mo.-Do.: 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Fr.: 8:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Scannen Sie diesen QR-Code,
um zur Website zu gelangen



Kontakt für Betroffene und Angehörige

Telefon: 0800 1015023 – gebührenfrei
E-Mail: beratungsteam@hollister.com

Kontakt für Fachhandel und Kliniken

Telefon: 0800 4655478 – gebührenfrei
E-Mail: kundenservice@hollister.com